


CE

# AIR RELAX<sup>®</sup> PLUS

## Kasutusjuhend

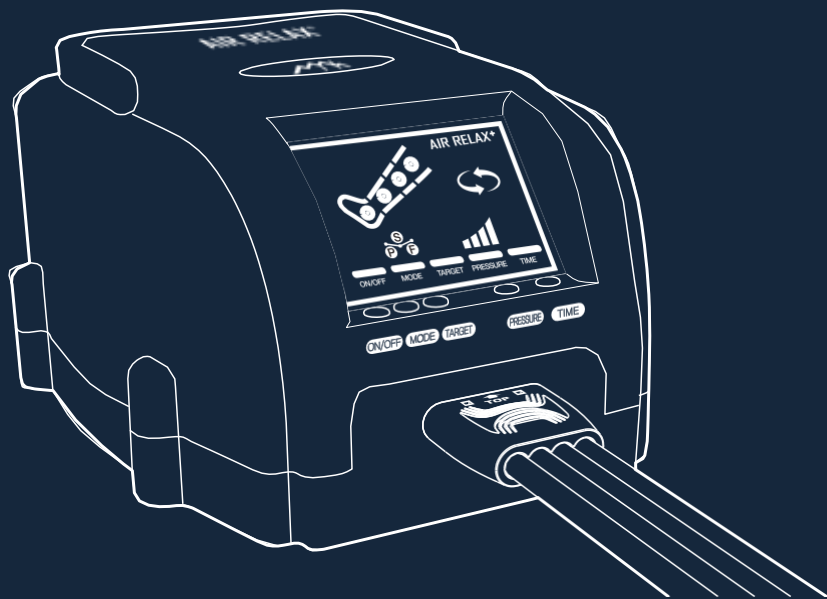

Enne Air Relax Plus seadme kasutamist tutvuge juhendiga põhjalikult. Hoidke see kasutusjuhend seadme läheduses, et vajaduse korral lugeda. Antud juhendisse on lisatud detailid, mida tuleb jälgida, et vältida selle seadme kasutamisel ohtu või varalist kahju ja tagada turvaline kasutamine.

MUDEL AR-3.0

# SISUKORD

---

Sisukord	02
Ohutusteave	03
Tähistused	06
Üldine informatsioon	07
Kasutamine ja seadme osad	08
Ekraan	09
Funktsiooninupud	10
Töötükk	12
Kuidas seda seadet kasutada	14
Hooldamine ja hoiustamine	19
Tõrkeotsing	20
Garantii	21
Tagastamispoliitika	22
Spetsifikatsioonid	23

# OHUTUSTEAVE

---

## **WARNING**

- Teie turvalisuseks ja varalise kahju vältimiseks, palun lugege seda juhendit hoolikalt ja toimige vastavalt. Juhendi eiramine võib põhjustada tõsiseid, vigastusi, summa ja/või tõsist varalist kahju. Ärge kasutage süsteemi muul viisil kui juhendis kirjas.
- Ärge kasutage seda seadet kui Teil on kasutuskoha lähedal põletik, infektsioon, lahtised haavad või verejooks.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete ja puuduvate kogemuste ja teadmistega inimesed, ainult järevalve all või kui neile on antud põhjalikud juhised seadme kasutamise kohta ning nad mõistavad võimalikke ohte.
- Lastel on keelatud seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi ilma järevalveta seadet puhastada või hooldada.

## **WARNING**

- 1) Hoidke süsteem, sealhulgas voolikud ja juhtmed, lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
- 2) Ärge kasutage süsteemi tuleohtlike gaaside, sealhulgas tuleohtlike anesteetikumide juuresolekul.
- 3) Ärge muutke ühtegi süsteemi osa.
- 4) Ärge kasutage süsteemi soojust tekitavate materjalide või kütteseadmete läheduses. See võib põhjustada süsteemi talitushäireid ja/või ülekuumenemist.
- 5) Ärge laske seadmehel maha kukkuda, kasutage liigset jõudu ega asetage seadmele

# OHUTUSTEAVE

---

## **WARNING**

- 1) Ärge hoidke süsteemi kõrgete magnetväljade läheduses ega kohtades, kus magnetväli võib seda mõjutada, sest see võib põhjustada aku tühjenemise.
- 2) Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage juhtploki ühtegi paneeli. Korpuse avamine tühistab Air Relaxi garantii. Kõiki hooldustöid peaks tegema ainult volitatud teeninduspersonal.
- 3) Elektrilöögi ohu vältimiseks lülitage süsteem alati välja ja ühendage toitejuhe pistikupesast lahti, kui seadet ei kasutata.
- 4) Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge kasutage seadet vee lähedal, nt köögis, vannitoas, saunas ja basseinis.
- 5) Hoidke süsteem eemal kütteseadmetest
- 6) Kui akut ei kasutata pikemat aega, laadige seadet üks kord kuus. Kui aku jääb tühjaks, võib see halvendada aku elutsükli ja toimivust.
- 7) See akupakk sisaldab liitiumioonakut.
- 8) See süsteem on mõeldud koduseks kasutamiseks. Äriline kasutamine põhjustab süsteemi enneaegse lagunemise.

## **WARNING**

1. Kui Teil tekib kasutamise ajal tugev valu, ebanormaalsed sümptomid või soovite hädaolukorras surve peatada. Peatage süsteem toitenuppu vajutades ja eemaldage mansett jäsemetelt. Vajadusel pöörduge tervisehoiutöötaja poole.
2. Lõpeta ravi süsteemi jõudluse muutuste korral.
















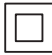






---

## CAUTION

- Ärge kasutage seadet väljaspool lubatud temperatuuri (+10°C kuni +40°C).
- Ärge kasutage süsteemi üle määratud õhuniiskuse vahemiku: 35%rH – 85%rH.
- Süsteemi kahjustuste vältimiseks hoidke seda tolmu, kiudude ja mustuse eest.
- Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud tarvikuid. Muud tarvikud võivad süsteemi kahjustada või süsteemi toimimist häirida
- Mansett ei ole steriilne, ärge asetage seda lahtistele haavadele, haavanditele, löövetele, infektsioonide ega niitide vastu.
- Manseti all on soovitatav kanda õhukesi riideid.

# TÄHISTUSED

Järgnevad tähistused on märgitud juhtseadmele, mansettide, ja/või pakendile.

SÜMBOL	KIRJELDUS	ASUKOHT	SÜMBOL	KIRJELDUS	ASUKOHT
	Jälgi kasutusjuhendit	Juhtseadmel		Transportimise ja ladustamise niiskuse piiramine	Juhtseadmel ja pakendil
	Loe juhendit	Juhtseadmel ja rõivasildil		Transpordil rõhu piirang	Juhtseadmel ja pakendil
	Topelt isolatsioon	Juhtseadmel		Õrn, käsitleda ettevaatlikult	Pakendil
	Alalisvool	Juhtseadmel		See pool üles	Pakendil
	Tootja	Juhtseadmel ja rõivasildil		Mitte pesta	Rõivasildil
	Tootmiskuupäev	Juhtseadmel		Mitte keemiliselt puhastada	Rõivasildil
	Elektri- ja elektroonikaseadmete kogumine	Juhtseadmel ja akul		Ärge kasutage trummelkuivatust	Rõivasildil
	Seeria number	Juhtseadmel		Mitte valgendada	Rõivasildil
	Hoida päikese eest varjatud	Juhtseadmel ja pakendil		Mitte triikida	Rõivasildil
	Hoida kuivas	Juhtseadmel ja pakendil		Hoiaatus	Juhendis
	Transportimise ja ladustamise temp.	Juhtseadmel ja pakendil		Ettevaatusabi -nõud	Juhendis

# ÜLDINE INFORMATSIOON

---

Air Relax kompressioonsüsteem pakub ajutist lihasvalude leevendust, suurendab lihastes verevoolu, mis toetab lihaste taastumist ja võimaldab tugevalt ja tihemini sportida.

## VASTUNÄIDUSTUSED


---

- Ärge kasutage seda toodet kui rakendatavas piirkonnas on põletik, infektsioon, tundmatu valu või veritsus (keha sisene või väline), või kui vastavas keha piirkonnas või selle läheduses on haav.
  - Ärge kasutage seda süsteemi tundlikul nahal, paistes või põletikulistel aladel, kehva vereringe korral, nahaärrituste või seletamatu kõhu/sääre valu korral.
  - Ärge kasutage seadet kui Teile on määratud muu ravi või Teil on mõni vastunäidistus.
- 
- Ära kasuta seadet järgnevate tervislike seisundite puhul:
    - Akuutne kopsuturse
    - Akuutne tromboflebiit
    - Kongestiivne südamepuudulikkus
    - Akuutsed infektsioonid
    - Osteoporoos
    - Süvaveenitromboos (DVT)
    - Kopsuemboolia episoodid
    - Haavad, kahjustused või kasvavad manustamiskohas või selle lähedal
    - Kui rakendatavas piirkonnas või selle ümbruses asub ebasoodne haiguskoht või suurenenud venoosse või lümfi ringlusega kasvaja.
    - Luumurru või luu nihetuse korral rakendatavas piirkonnas või selle ümbruses.
  - Mitte kasutada raseduse ajal. Rasedad peavad enne seadme kasutamist konsulteerima arstiga.
  - Ärge kasutage kui Teil on probleeme veritsusega või vere hüübimisega.
  - See süsteem ei kujuta endast meditsiinilist ravi ega asenda tervisekontrolli ega diagnoosi. Kui Teil on tõsine tervislik seisund, konsulteerige enne kasutamist oma arstiga.

# KASUTAMINE

Air Relax Plus juhtseade viib õhu mööda silikoonist voolikuid Air Relax Plus mansettidesse.

## SEADME OSAD

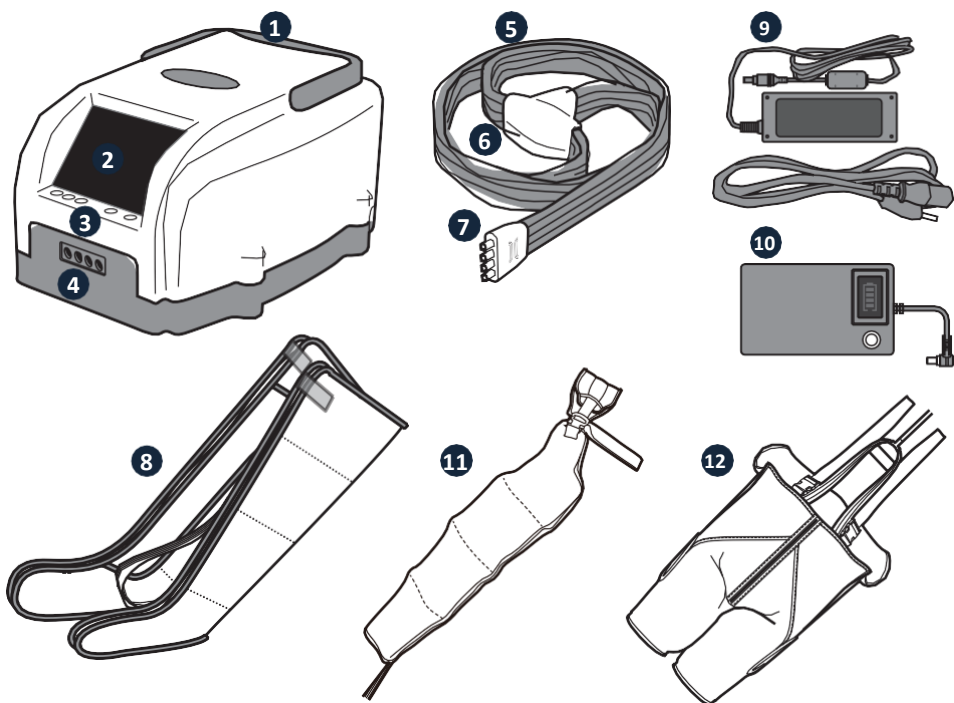

- |    |                    |     |                           |
|----|--------------------|-----|---------------------------|
| 1. | Käepide            | 7.  | Vooliku pistik            |
| 2. | Ekraan             | 8.  | Jalamansetid              |
| 3. | Funktsiooninupud   | 9.  | AC Adapter                |
| 4. | Õhukamber          | 10. | Aku (valikuline)          |
| 5. | Silikoonist voolik | 11. | Õlamansett (valikuline)   |
| 6. | T-terminal         | 12. | Puusamansett (valikuline) |




# EKRAAN



- **CHAMBERS:** Kuvatakse nelja eraldi õhukambrit. Kui ekraani taustavalgus läheb põlema, siis täitub kuvatud kamber õhuga.
- **ON/OFF:** Kuvab energia oleku
- **MODE P, S, F:** Kuvab antud hetkel kasutatava režiimi
- **TARGET:** Kuvab TARGET režiimi staatuse. Valitud piirkonna tuluke läheb tööle.
- **PRESSURE:** Kuvab õhusurve taseme
- **TIME:** Kui vajutada TIME nupule, siis alustab 30 minutiline sessioon.

# FUNKTSIOONINUPUD

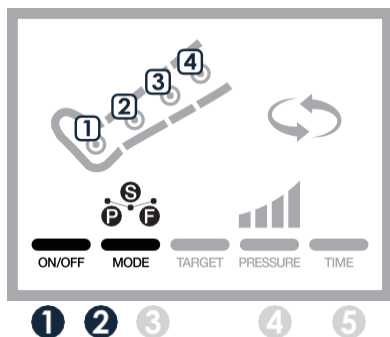

## 1 ON/OFF nupp

- Seadme sisse- ja väljalülitamine
- Vajutades nupule hakkab automaatselt tööle “P” režiim (surve tase 1)
- Seade lülitub automaatselt välja 15 minuti pärast, kui sessiooni käigus pole vajutatud ühelegi teisele nupule.
- Kui sessiooni käigus vajutada teistele nuppudele, siis lisandub veel 15 minutit alates vajutamise hetkest.


## 2 MODE nupp

- Selle nupuga saab valida P, S, F režiimi vahel. Režiimi muutmiseks vajuta “MODE” nupule

- “P” režiim:



- “S” režiim:

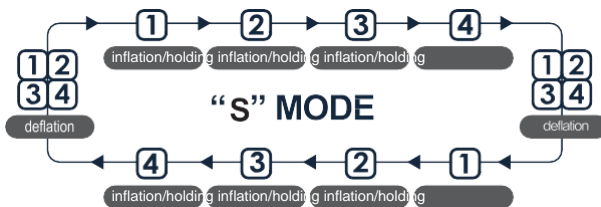


- “F” režiim:



Juhul kui sessiooni ajal vajutatakse nuppu “TARGET” või “MODE”, kustub märgutuli ja äsja valitud režiimi tuli süttib.


### 3 TARGET nupp

- Vajuta seda, et valida soovitud kamber
- Tsüklisüsteemi vaikesead on "S" režiim.

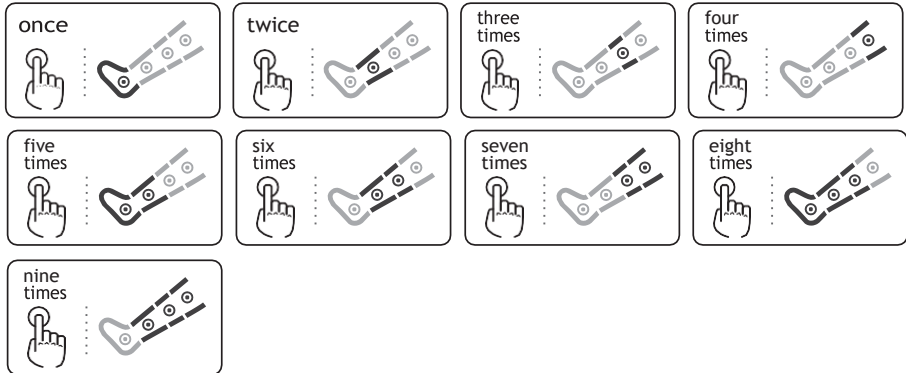

### 4 PRESSURE nupp

- Antud nupp on mõeldud surve reguleerimiseks. Saate valida sobiva tugevusega massaaži.
- Madalama survega funktsiooniga on õrnem massaaž, suurema survega tugevam massaaž. Kui massaaž on liiga tugev, siis alandage survet.
- Vaikesurve level on 1.

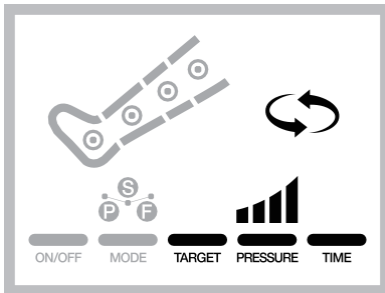

1 2 3 4 5

Level 1: 60 mmHg

Level 2: 100 mmHg

Level 3: 140 mmHg


Level 4: 170 mmHg

### 5 TIME nupp


- Antud nupuga saate valida sessiooni aega.
- Vajutage "TIME" nupule, et pikendada sessiooni aega 15 minutilt 30-le minutile. Vajutage uuesti kui soovite valida tagasi 15 minuti pikkust sessiooni.

# TÖÖTSÜKLID

## OPERATION CYCLE OF MODE

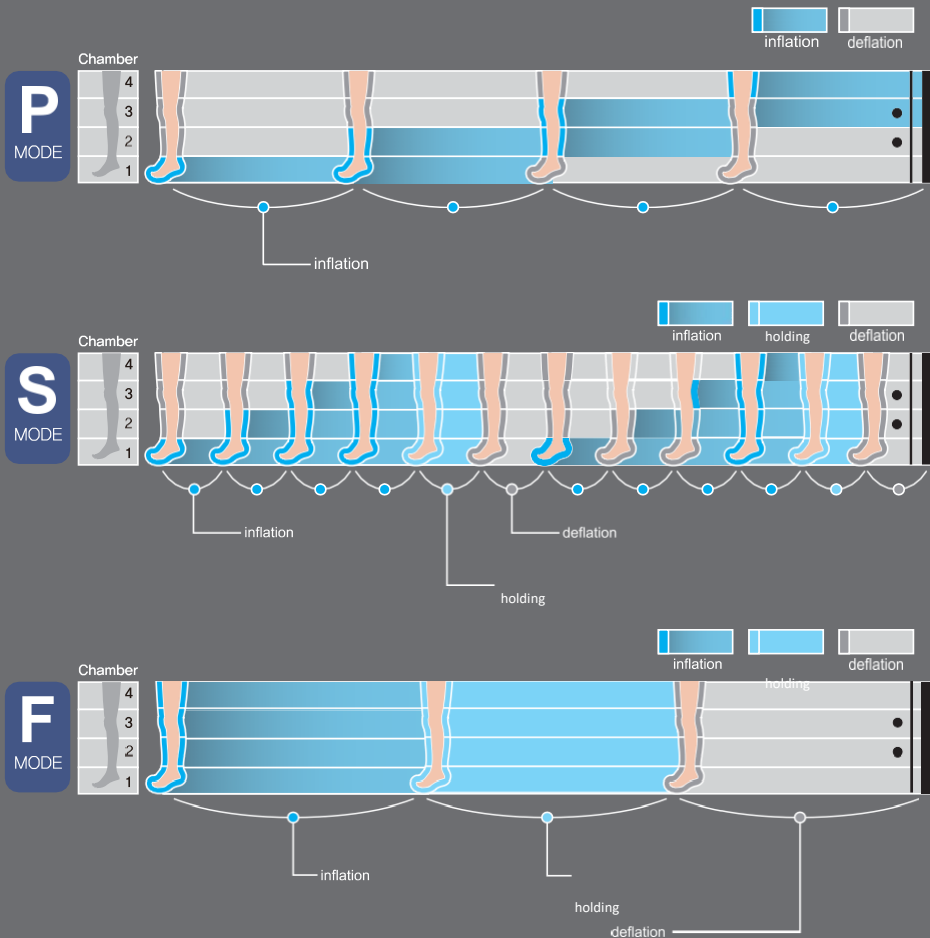

# OPERATION CYCLE OF TARGET

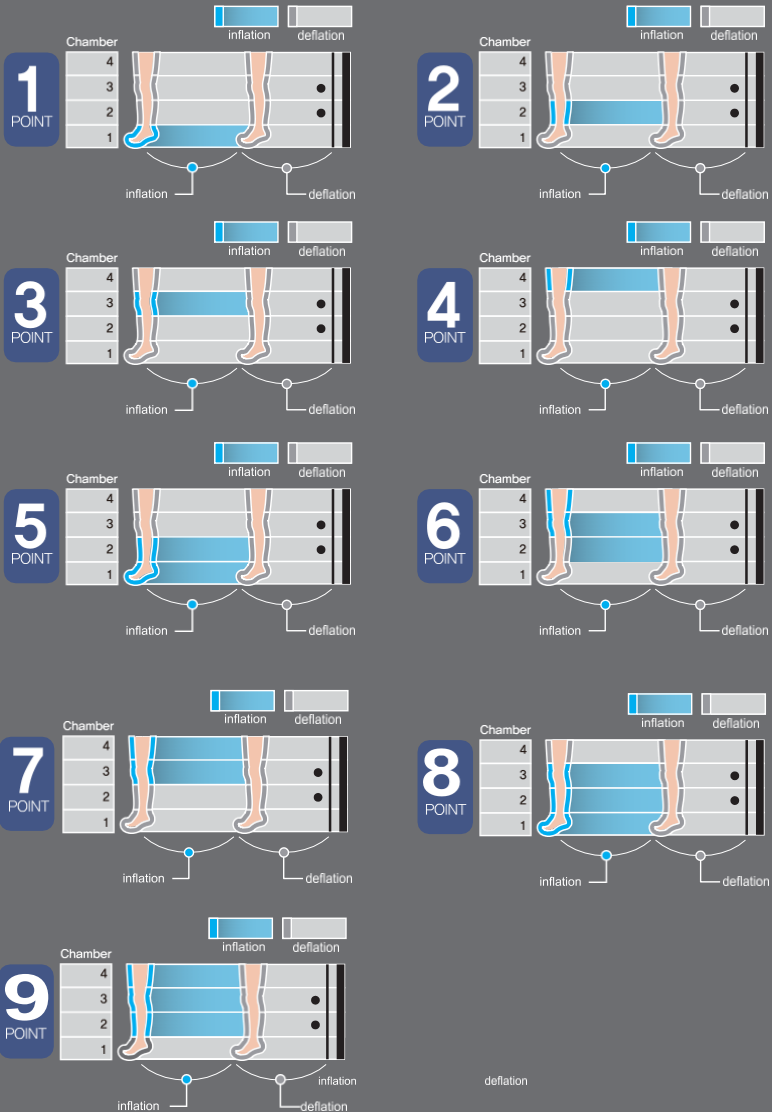

## KUIDAS KASUTADA SEDA SEADET



### WARNING

#### Teie turvalisuseks ja varalise kahju vältimiseks.

Lugege see juhend hoolikalt läbi ja kasutage vastavalt juhistele. Juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi, surma ja/või tõsist varalist kahju.

#### - Juhtseadme seadistamine




- Juhtseade tuleks asetada stabiilsele tasasel pinnal, kust see ei libise ega kuku. Asetage seade nii, et kasutaja saaks sessioonide ajal hõlpsasti kätte.
- Ühendage AC Adapter juhtseadmega, seejärel ühendage see pistikupesaga.
- Kui Te kasutate seadet akuga (müüakse eraldi), siis tutvuge akuga kaasasolevate juhenditega.



### WARNING

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat AC Adapterit, mille mudeli number on EM10681P. Teiste adapterite kasutamine võib põhjustada elektrišokki ja lõpetab Air Relaxi poolt pakutava garantii kehtivuse.

#### - Ühendage voolikupistik juhtseadmesse

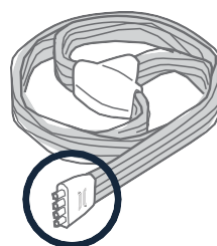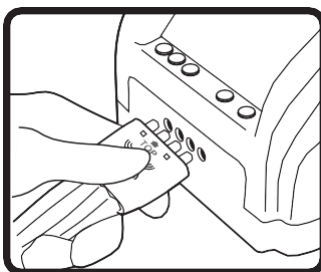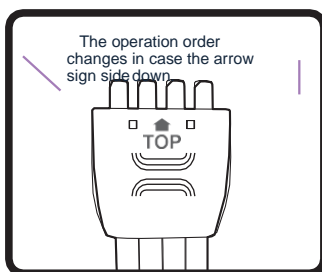

Hose plug



- Voolikud ei tohi pöörata ega murda.
- Ühendage voolikukomplekt juhtseadme õhukambriga. Veendu, et noolemärk oleks ülespoole.
- Voolikupistik peab olema täielikult ühendatud, et vältida õhu välja lekkimist.

## - Asetage mansett soovitud kohta




### CAUTION

Mansett ei ole steriilne, ärge asetage seda otse avatud haavadele, haavanditele, löövete, infektsiooni ega niitude vastu. Soovituslik on manseti all kanda õhukesi riideid. Enne manseti kasutamist eemaldage ehted/kellad.

#### • Jalamansett

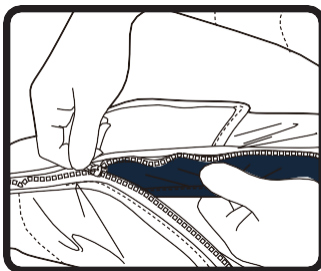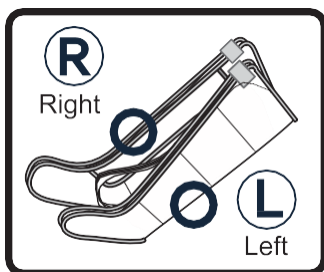

- Tee kindlaks, et vasak (left) ja parem (right) mansett on õiges jalas.
- Manseti jalga panemiseks, ava lukk pooleldi, seejärel sisesta jalg.
- Tõmba mansett ilusti jalga.
- Sulge lukk täielikult. Jälgige, et riided ei takerduks luku vahele
- Asetage lukk lapikult nagu pildil ja kinnitage takjaribaga tugevalt.

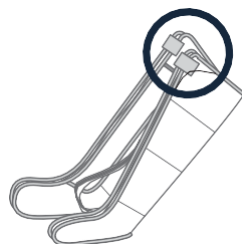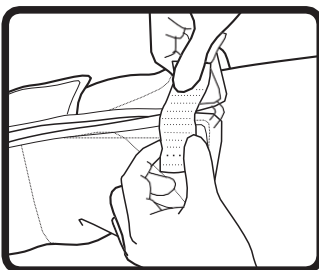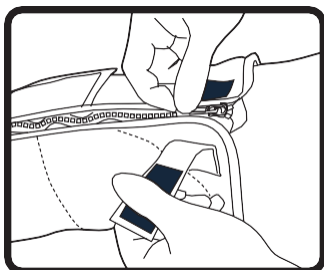


## KUIDAS KASUTADA SEDA SEADET

---

### CAUTION

Kinnita takjariba, et vältida luku avanemist õhusurve tulemusena kui kambrid täituvad õhuga. Kui see juhtub siis ära muretse, lihtsalt lülita seade välja ja kinnita lukk vastavalt eelnevale juhisele.

### • Õlamansett

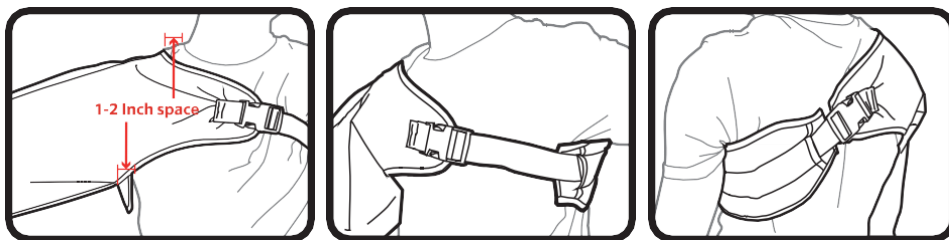


- Pange käsi õlamanseti sisse nii, et lukk jääb käe peale.
- Tõmmake mansett üle õla nii, et kaela ja manseti vahele jääb 2,5-5 cm ruumi.
- Pange kinnitusrihm ümber kere, vaba käe alla.
- Kinnitage rihtm kere külge ja reguleerige pikkust, tõmmatest lukust seni kuni mansett on mugavalt seljas.

### CAUTION

Üle 100mmHg (Level 10) rõhu kasutamine õlamansetiga pole soovitatav.



## - Puusa mansett

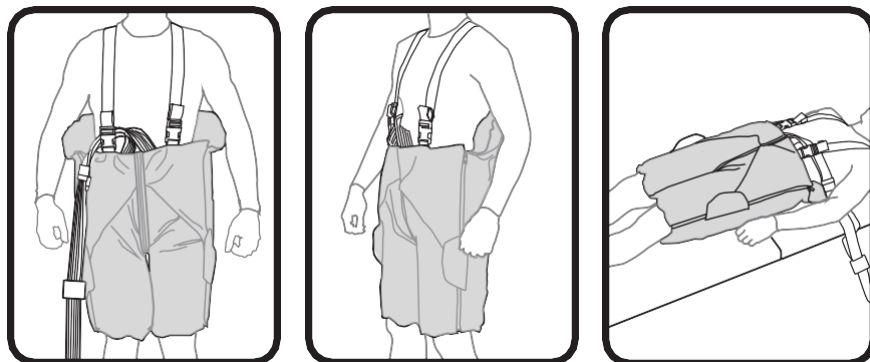

- Aseta puusamansett voodile või diivanile, logo peab jääma ülespoole.
- Puusamanseti mõlemal poolel on lukk. Ava mõlemalt poolt lukk poole võrra.
- Aseta mansetti jalga, sulge lukud. Jäta lukud suletuks terveks sessiooniks.
- Mansett ei tohiks olla liiga ümber. Kui mansett on liiga ümber, vähenda survet või lülita seade välja.
- Puusamanseti mõlemal poolel on 2 traksi. Too traksid üle rinna ja kinnita need. Trakside suurust saab reguleerida.

### CAUTION

Üle 100mmHg (Level 10) rohu kasutamine puusamansetiga pole soovitatav. Air Relax puusamansett ei ole mõeldud kasutamiseks istudes või seistes. Kasuta neid, olles selili, lamades voodis või muul tasasel pinnal.


### WARNING

Kui olete rase või kahtlustate rasedust, ei tohi Air Relax puusamansetti kasutada.

## KUIDAS KASUTADA SEDA SEADET

### - SESSIOONI KÄIVITAMINE

- Vaikeseadetes on "P" režiim, 15 minutit survega 1.

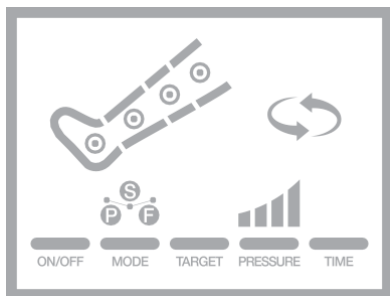

- Vajutage ON/OFF nuppu, et seade sisse lülitada.
- Vajutage MODE nuppu, et valida režiim.
- Vajutage PRESSURE nuppu, et valida soovitud surve.
- Vajutage TIME nuppu, et valida 15 või 30 minutilise sessiooni vahel.

Kui antud sessiooni käigus vajutada teistele funktsiooninuppudele, siis lisandub veel 15 minutit alates hetkest kui vajutada funktsiooninupule.

Sessiooni alguses kasutatakse rõhu kalibreerimiseks Teie jäseme(te) või keha ümbermõõdu põhjal mõnda täispuhumistsükli. Esimese kahe tsükli täielikuks täitmiseks võib kuluda kauem aega.

Soovituslik sessiooni pikkus enne treeningut on 15-30 minutit ja peale treeningut 30-45 minutit. 15 minuti pikkune sessioon pakub lõõgastavat massaaži.

### - SESSIOONI LÕPETAMINE

Kui sessioon on läbi, siis seade lülitab end automaatselt välja. Laske mansettidel enne eemaldamist 30 sekundit tühjeneda.

#### CAUTION

Kui Teil tekib valu või ebamugavustunne või kui ilmnevad verevalumid, ärritus või punetus seansi ajal või pärast seda, siis lõpetage kasutamine ja konsulteerige koheselt oma arstiga.

# HOOLDAMINE

---

- Juhtseade: Seadme välispinda saab puhastada pehme, kergelt niiske lapiga.

## CAUTION

Juhtseade ei ole veekindel. Ärge valage juhtseadmele vedelikku ja ärge laske sellel koguneda seadme esipaneelile.

Juhtseade vajab korrapärasest hooldust vähemalt kord 3 kuu jooksul.

- Pistik: Saab puhastada pehme, kergelt niisutatud lapiga.
- Mansett: Puhasta mansette pehme, õrnalt niiske lapiga. Kuivata pehme rätikuga. Enne kasutamist peab mansett olema täiesti kuiv.

## CAUTION

- Pinna pühkimiseks kasutage lappi
- Masinpesu ega keemiline puhastus ei ole lubatud
- Ärge kasutage valgendajat.
- Ärge triikige ega kasutage trummelkuivatust .

# HOIUSTAMINE

---

## CAUTION

Ärge hoidke seadet ekstreemselt külmas või soojas kohas (alla  $-25^{\circ}\text{C}$  või üle  $+70^{\circ}\text{C}$ ). Ärge jätke seda kuuma või külma autosse. Ärge jätke seadet otsese päikese kätte.

- Seade toimib temperatuuril ( $+10^{\circ}\text{C}$  kuni  $+40^{\circ}\text{C}$ )
- Seadet võib hoiustada temperatuuril  $-25^{\circ}\text{C}$  kuni  $+70^{\circ}\text{C}$
- Õhuniiskus 15% kuni 90%
- Atmosfäärirõhk 700-1060 hPa
- Hoida jahedas, kuivas, hästi ventileeritavas kohas. Optimaalne hoiustamine toatemperatuuril.

# TÖRKEOTSING

Probleem	Põhjus	Lahendus
<b>Juhtseade ei lähe tööle.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pole elektriühendust</li> <li>- Toitejuhe pole õigesti ühendatud</li> <li>- Tühi aku</li> <li>- Sisemine rike</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollige seinakontakti</li> <li>- Veenduge, et toitejuhe oleks korralikult pistikupessa ühendatud</li> <li>- Lülitage toitelüliti sisse.</li> <li>- Laadige akut</li> <li>- Võtke ühendust Air Relaxiga</li> </ul>
<b>Juhtseade ei pumpa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tühi aku</li> <li>- Sisemine rike</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laadige akut</li> <li>- Võtke ühendust Air Relaxiga</li> </ul>
<b>Mansetid ei täitu täielikult</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kahjustatud pistikud</li> <li>- Kahjustatud voolik</li> <li>- Katkised mansetid</li> <li>- Sisemine rike</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollige, et pistikul poleks füüsilisi kahjustusi</li> <li>- Kontrollige, et voolikul poleks sees volte ja keerde.</li> <li>- Kontrollige, kas voolikud on juhtseadme, mansettide ja pistikutega ühendatud</li> <li>- Vaadake ega mansettidel pole auke.</li> <li>- Võtke ühendust Air Relaxiga</li> </ul>
<b>Ebatavaline heli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ebahütlane pind</li> <li>2. Sisemine rike</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tee kindlaks, et juhtseade on tasasel pinnal ning kõik neli jalga on maas.</li> <li>4. Võtke ühendust Air Relaxiga</li> </ol>

## GARANTII

Air-Relax seadmele/lisatarvikutele kehtib tootja poolt ühe aastane garantii alates Air-Relax seadme ostukuupäevast tootmisvigade eest materjalis ja töö kvaliteedis. Juhul kui garantiiaja käigus esineb viga, siis tootja omal äranägemisel, kas (a) korrigeerib vea parandusega või vahetades vastava osa või komponendi välja, mis on tekitanud sellise vea seadmes. Ilma lisatasuta osade või töökuulu eest; või (b) vahetab seadme välja sama või uuema seadme mudeli vastu. Air-Relax seadme juurde kuuluvad jalamansetid, seade ja õhuvoolikud.

Käesolev garantii ei hõlma toote tavapärasest kulumist ega kosmeetilisi kahjustusi, ning garantii on kehtetu kui seadet/lisatarvikuid ei kasutata vastavalt Kasutusjuhendile; kui seade või selle lisatarvikud on muul viisil väärkasutatud või mistahes moel muudetud; ja/või seda on parandatud kellegi muu poolt kui tootja ametlik hooldusteenuse esindaja. See garantii välistab sõnaselgelt transportatsiooni, tarne või kindlustuskulud; vead, kahjud või rikked, mis on põhjustatud seadme või selle lisatarvikute väärkasutamisest, rikkumisest, valesst või ebatavalisest kasutusest, või hooletusest.

VÄLJA ARVATUD EELNEVALT MAINITUD GARANTII TINGIMUSTELE, EI VÄLJENDA AIR-RELAX MISTAHES MUUD GARANTIID EGA EELDA MINGIT GARANTIID, SEALHULGAS KAUBANDUSLIKKUST JA SOBILIKKUST TEATUD EESMÄRGIKS JA KASUTAMISEKS, JA GARANTIIAEG PIIRNEB EELNEVALT SELGESÕNALISELT VÄLJENDATUD AJAPERIOODIGA. AIR-RELAX-IL EI OLE MINGIT KOHUSTUST EGA VASTUTUST OMA KLIENTIDE EGA MUUDE ISIKUTE EGA ÜKSUSTE EES.

AIR RELAX EI EELDA MINGIT KOHUSTUST VARALISE KAHJU VÕI KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME OTSESEST VÕI KAUDSEST KASUTAMISEST; SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA VÕI MISTAHES SELLE GARANTII RIKKUMISE EEST; SEALHULGAS KUID MITTE AINULT KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD EBAMUGAVUSEST, AJAKULUST, KINNISVARAST VÕI SISSETULEKUST; EGA MISTAHES KAUDSETE, ERILISTE, ÕNNETUSLIKKUDE VÕI TEGEVUSE TULEMUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST.

Mõned riigid ei luba juhuslike või tulenevate kahjude piiranguid või erandeid, seega eelnevad piirangud või erandid ei pruugi Sinule rakenduda. Garantii annab Sulle teatud seaduslikud õigused, ning Sul võivad olla muud õigused, mis erinevad igas riigis. Juhul kui toote defekt on kaitsitud käesoleva garantii poolt vastava garantiiperioodi vältel, siis saada toode tagasi aadressil: Air Relax, 990 S.Via Rodeo, Placentia, CA 92870, ette makstud tarne kuludega ja kindlustusega ning lisa viide tuvastatud defektile. Kõik asendusosad ja tooted muutuvad Air-Relax omandiks. Garantii teenuse läbiviimise käigus võivad kasutusel olla uued või taastatud osad ja tooted. Remonditud või asendatud osad ja tooted on garantii all kogu ülejäänud algse garantiiaja vältel. Sulle esitatakse arve mistahes remondi või asendusosade eest, mis on tehtud väljaspool vastavat garantiiaga.

## TAGASTAMISPOLIITIKA

Käesolev tagasisaatmispoliitika rakendub ainult siis, kui Sa oled lõppkasutaja ja ostsid seadme otse Air Relax-ilt.

Juhul kui Sa pole oma ostuga rahul, mis on ebatõenäoline, siis võid selle tagastada (30) päeva jooksul alates ostukuupäevast. Kõikidele tagasisaatmistele ja asendustele rakenduvad järgnevad tingimused.

1. Tagasisaatmistel ja vahetamistel peab olema lisatud Kauba Tagasisaatmisloa (Return Merchandise Authorization ehk RMA) number. Küsi RMA numbrit kirjutades meile e-postil [sales@air-relax.com](mailto:sales@air-relax.com). Ilma RMA numbrita tagasisaadetud toodete eest ei kehti õigus saada oma kontole nende eest krediiti.
2. Tagasisaadud tooted peavad saabuma kohale 15 päeva jooksul alates RMA numbri väljastamisest.
3. Toode ja toote pakend peavad olema tagastatud uues ja kahjustusteta seisukorras. Kõiki tooteid, mis näitavad kulumismärke või on mistahes moel määrdunud määratletakse “vastuvõetamatuna” ja Sulle saadetakse selle kohta märguanne. Vastuvõetamatud tagasisaatmised või asendused saadetakse Sulle tagasi pärast ülevaatuse/tarnekulude makse kätte saamist.
4. Tagasi saadetud toodetele rakendub 10% uuesti varustamise tasu. Tagasi saadetud toode on toode, mis on saadetud meile tagasi tagasimakse jaoks.
5. Kui Sa keeldud mistahes põhjusel oma tellimuse kättesaamisest, siis saadetakse Sulle tellimuse eest makstud raha tagasi, millest on võetud maha tarnekulud pärast toote kättesaamist ja inspeksiooni.
6. Kõik osalised või täielikud tagasimaksed saadetakse krediitkaardile, mida kasutati ostu tegemise ajal.
7. Air Relax ei vastuta tarne ajal kadunud või kahjustatud asjade eest.

### JUHISED TAGASI SAATMISEKS

1. samm: Võta meiega ühendust e-postil [sales@air-relax.com](mailto:sales@air-relax.com), et saada RMA (Return Merchandise Authorization) number.
2. samm: Aseta toode või tooted originaalpakendis ja kogu originaal dokumentatsiooniga tarne kohta pakkekasti. Tee kindlaks, et lisad tarne juurde oma nime, tellimuse numbri (kui see rakendub), kontaktinfo, põhjus tagastamiseks/asendamiseks, ja RMA numbri, et me saaksime korralikult läbi vaadata Sinu tagasisaatmise või toote asenduse.
3. samm: Tee kindlaks, et Sinu nimi, aadress ja RMA number on samuti lisatud pakkekasti peale ja adresseeri see järgnevalt: Air Relax, 990 S Via Rodeo, Placentia, CA 92870.
4. samm: saada oma tagasisaadetis paki jälgimisteenuse ja kindlustusega. Air Relax ei vastuta tarne käigus kaotatud või kahjustatud asjade eest.

- Toote registreerimine aitab meil pakkuda Sulle kiiremat ja efektiivsemat teenust ning toetab ja tagab Sulle selle, et saaksid maksimaalse kasu garantiist. Registreeri oma toode internetis: [air-relax.com](http://air-relax.com).

# SPETSIFIKATSIOONID

## AIR RELAX PLUS MODEL AR-3.0

Pinge AC	18 V, — 2 A
Adapter	Input: 100-240 V~, 50-60 Hz, 60 W / Output: 18 V, — 3.15 A
Aku (Valikuline)	14.4 V, — 5000 mAh, 72 Wh
Elektrilöögi eest kaitsmise tüüp	Class II
Kasutamise ohutuse tase tuleohtliku anesteetilise segu korral koos õhuga või hapniku või dilämmastikoksiidiga	Seade, ei sobi kasutamiseks tuleohtliku anesteetilise segu korral koos õhuga või hapniku või dilämmastikoksiidiga.
Mode of operation	Continuous
Kasutusaeg	15, 30 minutit
Surve	60 mmHg – 170 mmHg
Seadme mõõdud	9.4 inch X 4.7 inch X 7.4 inch (240 mm X 120 mm X 190 mm)
Seadme kaal	4.8 lbs. (2.2 kg)



See toote või selle juhendil olev märgistus näitab, et seda ei tohi selle tööea lõppedes koos teiste olmejäätmetega ära visata, et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest keskkonnale või inimeste tervisele tekkivat võimalikku kahju.

Kodukasutajad peaksid pöörduma kas jaemüüja poole, kust toode osteti või kohaliku omavalitsuse kontoris, et saada teavet kuidas nad saaksid seda keskkonnoahtuaks ringlusessevõtuks kulutada. Ärikasutajad peaksid võtma ihendust oma tarnijaga ja kontrollima ostukontakti tünimusi. Seda toodet ei tohi utiliseerimiseks segada muude kommertsjätmetega.

CE

# AIR RELAX<sup>®</sup> PLUS



9535 Brasher Street  
Pico Rivera, CA 90660 USA  
+1.525.821.5225  
[www.air-relax.com](http://www.air-relax.com)  
[www.air-relax.eu](http://www.air-relax.eu)



MODEL AR-3.0

MSI-MUL-AR-3.0 REV.1 [19.04.16]

---