

AIR RELAX® PRO

Kasutusjuhend



Enne Air Relax Pro seadme kasutamist tutvuge juhendiga põhjalikult. Hoidke see kasutusjuhend seadme läheduses, et vajaduse korral lugeda. Antud juhendisse on lisatud detailid, mida tuleb jälgida, et vältida selle seadme kasutamisel ohtu või varalist kahju ja tagada turvaline kasutamine.

MUDEL AR-4.0

SISUKORD

Sisukord	02
Ohutusteave	03
Tähistused	06
Üldine informatsioon	07
Kasutamine ja seadme osad	08
Ekraan	09
Funktsiooninupud	10
Töötükk	12
Kuidas seda seadet kasutada	13
Hooldamine ja hoiustamine	19
Tõrkeotsing	20
Garantii	21
Tagastamispoliitika	22
Spetsifikatsioonid	23

OHUTUSTEAVE

WARNING

- Teie turvalisuseks ja varalise kahju vältimiseks, palun lugege seda juhendit hoolikalt ja toimige vastavalt. Juhendi eiramine võib põhjustada tõsiseid, vigastusi, summa ja/või tõsist varalist kahju. Ärge kasutage süsteemi muul viisil kui juhendis kirjas.
- Seda süsteemi ei soovitata, kellel on südame- ja/või veresoonte probleeme või muu füüsiline seisund, mis nõuab mõne meditsiiniseadme kasutamist.
- Ärge kasutage seda seadet kui Teil on kasutuskoha lähedal põletik, infektsioon, lahtised haavad või verejooks.
- Antud seade pole mõeldud kasutamiseks väikestele lastele, füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete ja puuduvate kogemuste ja teadmistega inimestele, välja arvatud juhul kui on tagatud järelvalve või on antud põhjalikud juhised seadme kasutamiseks. Alla 18. aastased lapsed tohivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelvalve all. Seade pole mõeldud kasutamiseks alla 40kg kaaluvatele lastele.
- Lastel on keelatud seadmega mängida.
- Seadet ei tohi kasutada inimesed, kellel on vastunäidustused.

WARNING

- Hoidke süsteem, sealhulgas voolikud ja juhtmed, lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage süsteemi tuleohtlike gaaside, sealhulgas tuleohtlike anesteetikumide juuresolekul.
- Ärge muutke ühtegi süsteemi osa.
- Kasutage ainult originaalsed AC Adapterit, teiste adapterite kasutamine võib põhjustada elektrišoki ning lõpetab garantii kehtivuse.
- Ärge kasutage süsteemi soojust tekitavate materjalide või kütteseadmete läheduses. See võib põhjustada süsteemi talitushäireid ja/või ülekuumenemist.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda, kasutage liigset jõudu ega asetage seadmele rasket koormat. See võib põhjustada süsteemi häireid ja kahjustusi.

OHUTUSTEAVE

WARNING

- Ärge hoidke süsteemi kõrgete magnetväljade läheduses ega kohtades, kus magnetväli võib seda mõjutada, sest see võib põhjustada aku tühenemise.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage juhtploki ühtegi paneeli. Korpuse avamine tühistab Air Relaxi garantii. Kõiki hooldustöid peaks tegema ainult volitatud teeninduspersonal.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge proovige toitejuhet parandada ega modifitseerida. Kui toitejuhe on kahjustatud, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Skeemide, komponentide, seadme osade ja kirjeldustega, vm süsteemiga seotud teavet annavad selleks volitatud teenindajad.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks lülitage süsteem alati välja ja ühendage toitejuhe pistikupesast lahti, kui seadet ei kasutata.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge kasutage seadet vee lähedal, nt köögis, vannitoas, saunas ja basseinis.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge asetage toitejuhet vaipkattega katte alla ega katke liistude vms kattega.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge asetage toitejuhet mööbli või seadmete alla. Paigaldage toitejuhe nii, et keegi sinna komistada ei saa.
- Ärge asetage süsteemi, toitejuhet ega tarvikuid kohta, kus need võivad kahjustuda, kujutada endast ohtu või muutuda teistele takistuseks.
- Süsteemi kasutamisel hoidke seintest või külgnevatest esemetest vähemalt 25 cm ja süsteemi kohal olevatest esemetest 30 cm kaugusele.
- Hoidke süsteemi eemal kütteseadmetest.

OHUTUSTEAVE

WARNING

- Kui akut ei kasutada pikemat aega, laadige seadet üks kord kuus. Kui aku jääb tühjaks, võib see halvendada aku elutsükli ja toimivust.
- See akupakk sisaldab liitiumioonakut.
- See süsteem on mõeldud koduseks kasutamiseks. Äriline kasutamine põhjustab süsteemi enneaegse lagunemise.
- Kui Teil tekib kasutamise ajal tugev valu, ebanormaalsed sümptomid või soovite hädaolukorras surve peatada. Peatage süsteem toitenuppu vajutades ja eemaldage mansett jäsemetelt. Vajadusel pöörduge tervisehoitootaja poole.
- Lõpetage ravi süsteemi jõudluse muutuste korral.

CAUTION

- Ärge kasutage seadet väljaspool lubatud temperatuuri +10°C kuni +40°C.
- Ärge kasutage süsteemi üle määratud õhuniiskuse vahemiku: 35%rH – 85%rH.
- Süsteemi kahjustuste vältimiseks hoidke seda tolmu, kiudude ja mustuse eest.
- Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud tarvikuid. Muud tarvikud võivad süsteemi kahjustada või süsteemi toimimist häirida
- Mansett ei ole steriilne, ärge asetage seda lahtistele haavadele, haavanditele, löövetele, infektsioonide ega niitide vastu.
- Manseti all on soovitatav kanda õhukesi riideid.

TÄHISTUSED

Järgnevad tähistused on märgitud juhtseadmele, mansettide, ja/või pakendile.

SÜMBOL	KIRJELDUS	ASUKOHT
	Jälgi kasutusjuhendit	Juhtseadmel
	Loe juhendit	Juhtseadme ja rõivasildi peal
	BF tüüpi seadmete kaitsetase	Juhtseadmel
	Topelt isolatsioon	Juhtseadmel
	Alalisvool	Juhtseadmel
	Tootja	Juhtseadme ja rõivasildi peal
	Tootmiskuupäev	Juhtseadmel
	Elektri- ja elektroonikaseadmete kogumine	Juhtseadmel ja akul
	Seeria number	Juhtseadmel
	Hoida päikese eest varjatud	Juhtseadmel ja pakendil
	Hoida kuivas	Juhtseadmel ja pakendil
	Transportimise ja ladustamise temp.	Juhtseadmel ja pakendil
IP 21	Veekindluse aste	Juhtseadmel

SÜMBOL	KIRJELDUS	ASUKOHT
	Transportimise ja ladustamise niiskuse piiramine	Juhtseadmel ja pakendil
	Transpordil rõhu piirang	Juhtseadmel ja pakendil
	Õrn, käsitsege ettevaatlikult	Pakendil
	See pool üles	Pakendil
	Mitte pesta	Rõivasildil
	Mitte keemiliselt puhastada	Rõivasildil
	Ärge kasutage Trummelkuivatust	Rõivasildil
	Mitte valgendada	Rõivasildil
	Mitte triikida	Rõivasildil
	Hoiatus	Juhendis
	Ettevaatusabinõud	Juhendis
	Peale mitte astuda	Juhtseadmel

ÜLDINE INFORMATSIOON

Air Relax Pro seadme massaaž soodustab lihaste lõdevastamist, kogu keha lõõgastumist, stressi maandamist ja hoiab lihased stressivabana.


VASTUNÄIDUSTUSED

- Ärge kasutage seda toodet kui rakendatavas piirkonnas on põletik, infektsioon, tundmatu valu või veritsus (keha sisene või väline), või kui vastavas keha piirkonnas või selle läheduses on haav.
- Ärge kasutage seda süsteemi tundlikul nahal, paistes või põletikulistel aladel, kehva vereringe korral, nahaärrituste või seletamatu kõhu/sääre valu korral.
- Ärge kasutage seadet kui Teile on määratud muu ravi või Teil on mõni vastunäidustus.
- Ära kasuta seadet järgnevate tervislike seisundite puhul:
 - Akuutne kopsuturse
 - Akuutne tromboflebiit
 - Kongestiivne südamepuudulikkus
 - Akuutsed infektsioonid
 - Osteoporoos
 - Süvaveenitromboos (DVT)
 - Kopsuemboolia episoodid
 - Haavad, kahjustused või kasvajakasvud manustamiskohas või selle lähedal
 - Kui rakendatavas piirkonnas või selle ümbruses asub ebasoodne haiguskoht või suurenenud venoosne või lümfiringlusega kasvaja.
 - Luumurru või luu nihetuse korral rakendatavas piirkonnas või selle ümbruses.
- Mitte kasutada raseduse ajal. Rasedad peavad enne seadme kasutamist konsulteerima arstiga.
- Ärge kasutage kui Teil on probleeme veritsusega või vere hüübimisega.
- See süsteem ei kujuta endast meditsiinilist ravi ega asenda tervisekontrolli ega diagnoosi. Kui Teil on tõsine tervislik seisund, konsulteerige enne kasutamist oma arstiga.

KASUTAMINE

Air Relax Pro juhtseade viib õhu mööda silikoonist voolikuid Air Relax Pro mansettidesse.

SEADME OSAD

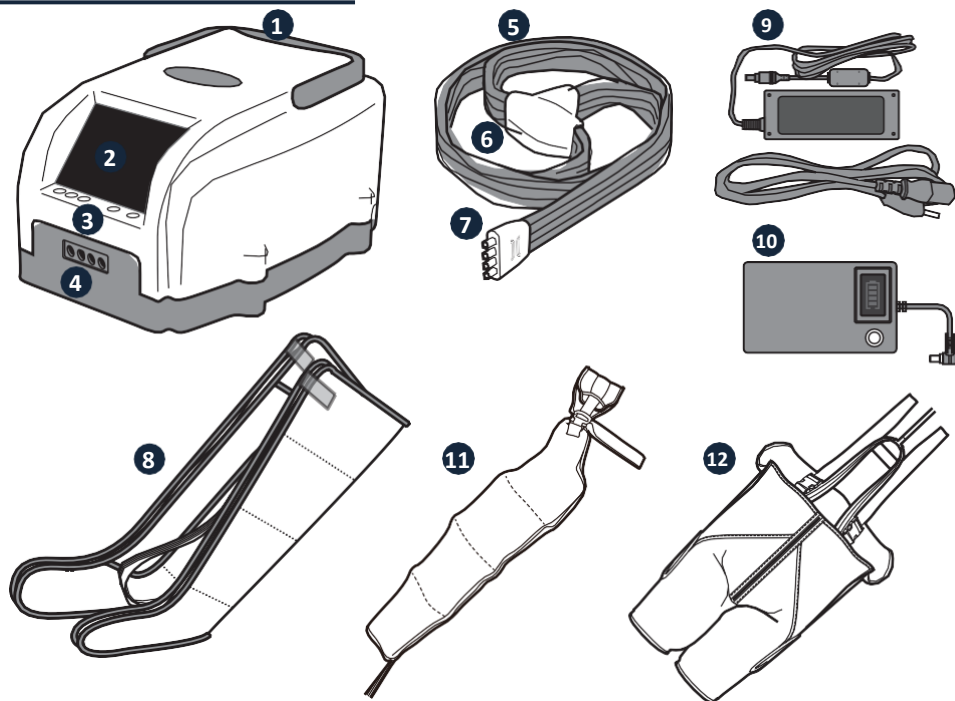


- | | | | |
|----|--------------------|-----|---------------------------|
| 1. | Käepide | 7. | Vooliku pistik |
| 2. | Ekraan | 8. | Jalamansetid |
| 3. | Funktsiooninupud | 9. | AC Adapter |
| 4. | Õhukamber | 10. | Aku (valikuline) |
| 5. | Silikoonist voolik | 11. | Õlamansett (valikuline) |
| 6. | T-terminal | 12. | Puusamansett (valikuline) |

EKRAAN



1. **MODE (REŽIIM):** SEQT; PROG; DRAIN; OVLAY. Ekraanil kuvatakse valitud töötsükkel.
2. **DEFLATE:** nupule vajutades mansetid tühjenevad 30 sekundiga
3. **TIME:** nupule vajutades saab valida sessiooni pikkust
4. **CHAMBERS:** Kuvatakse kuute eraldi õhukambrit. Kui tuluke põleb, siis vastav kamber täitub õhuga. Kuvatakse ka õhusurve. Saab valida survet (40 kuni 170 mmHg). Kambri valimiseks või keelamiseks hoidke all 3 sekundit.
5. **UP, DOWN:** Võimaldab reguleerida seansi aega 5-95minutit ja õhurõhu seadistust vahemikus 40-170 mmHg.
6. **START:** Vajutage sessiooni alustamiseks.
7. **STOP:** Seansi peatamiseks. Vajutage ja hoidke all 3 sekundi, et naasta programmi vaikesätetesse.
8. **TIME (min):** Kuvatakse mitu minutit sessiooni on veel jäänud, manseti tühjendamise ajal kuvatakse selleks kuluvaid sekundeid.


FUNKTSIOONINUPUD

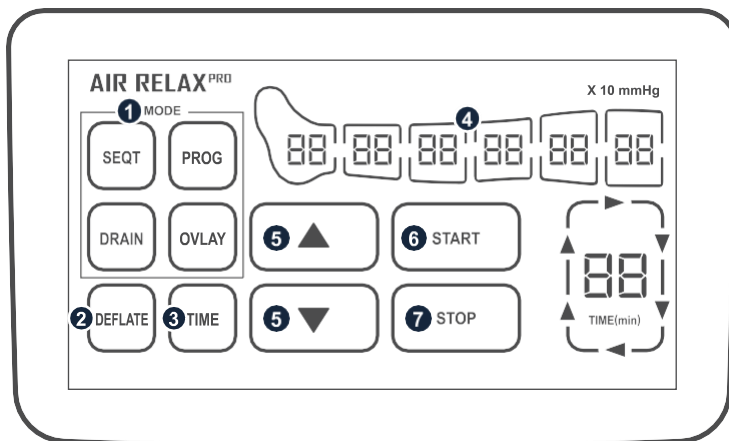


1. MODE nupp

Vajutage sellele, et valida soovitud režiim (SEQT, PROG, DRAIN, OVLAY)


9. Sequential Cycle Mode

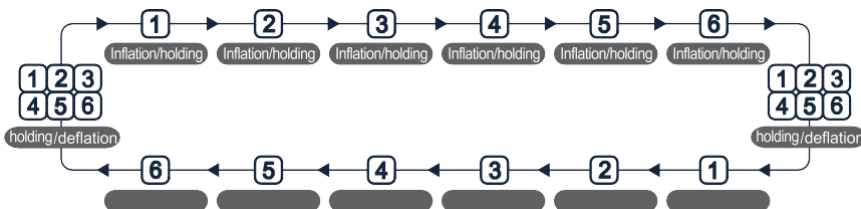

10. Progressive Cycle Mode

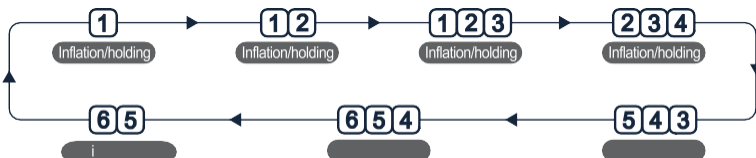


- *Drain Cycle Mode*

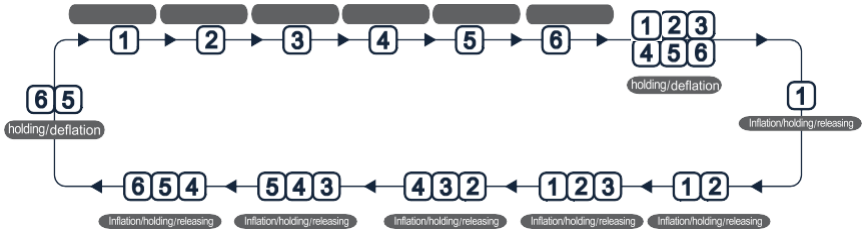

- *Overlay Cycle Mode*



TÖÖTSÜKKLID

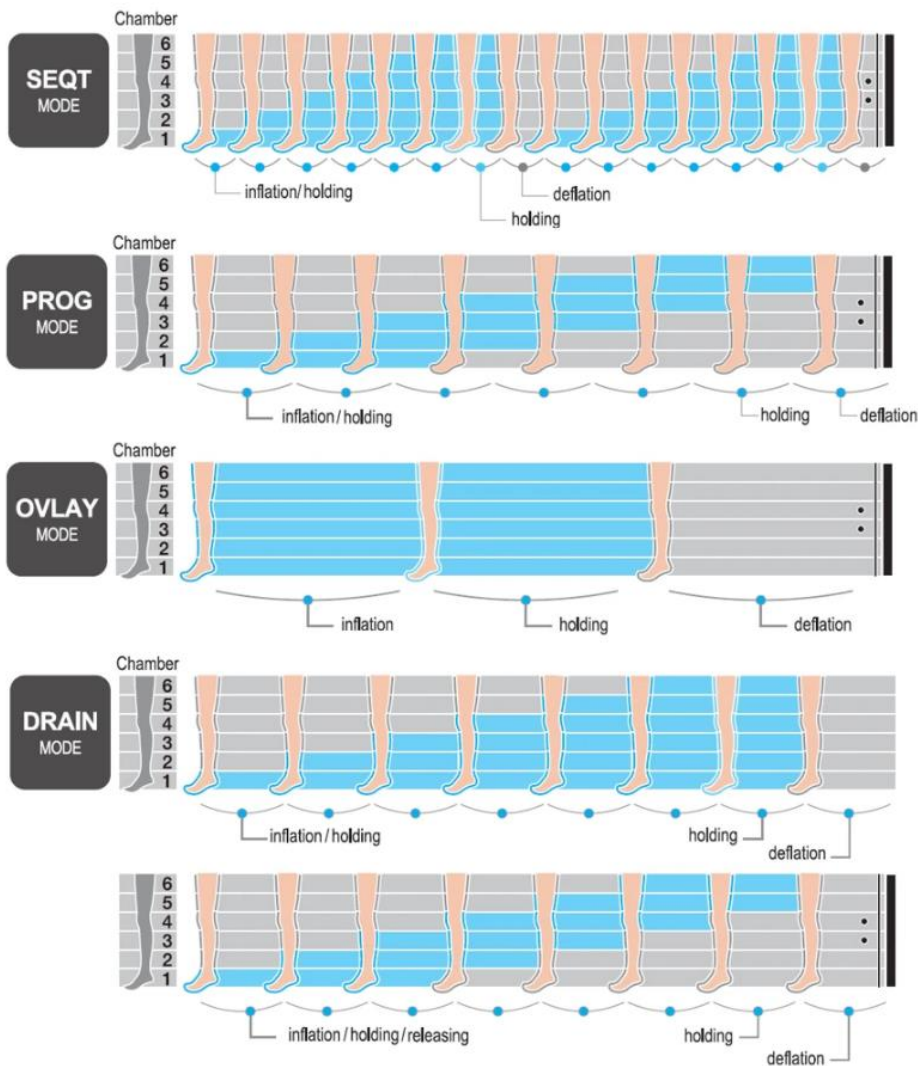

KUIDAS KASUTADA SEDA SEADET

HOIATUS!

TEIE TURVALISUSEKS JA KAHJUSTUSTE VÄLTIMISEKS:

Lugege käesolevat juhendit hoolikalt, kasutage seadet nii nagu ette nähtud. Hooletu kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi, surma ja/või tõsist varalist kahju.



1. Juhtseadme seadistamine

- Juhtseade tuleks asetada stabiilsele tasasele pinnale, kust see ei libise ega kuku. Asetage seade nii, et kasutaja ulataks sessiooni ajal hõlpsasti selleni.
- Ühendage AC Adapter juhtseadmega, seejärel ühendage see pistikupesaga.
- Kui Te kasutate seadet akuga (müüakse eraldi), siis tutvuge akuga kaasasolevate juhenditega.

HOIATUS!

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat AC Adapterit, mille mudeli number on EM10682P. Teiste adapterite kasutamine võib põhjustada elektrišokki ja lõpetab Air Relaxi poolt pakutava garantii kehtivuse.

2. Ühenda voolikupistik juhtseadmesse

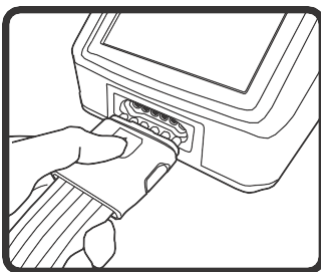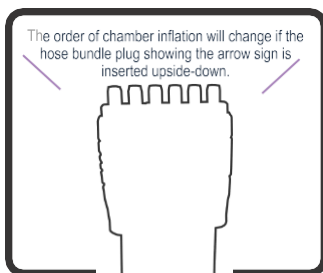

Voolikupistik



- 1) Voolikud ei tohi pöörata ega murda.
- 2) Ühendage voolikukomplekt juhtseadme õhukambriga. Veendu, et noolemärk oleks ülespoole.
- 3) Voolikupistik peab olema täielikult ühendatud, et vältida õhu välja lekkimist.


KUIDAS KASUTADA SEDA SEADET

3. Asetage mansett soovitud kohta

ETTEVAATUST!

Mansett ei ole steriilne, ärge asetage seda otse avatud haavadele, haavanditele, löövetele, infektsiooni ega niitude vastu. Soovituslik on manseti all kanda õhukesi riideid. Enne manseti kasutamist eemaldage ehted/kellad.

• Jalamansett

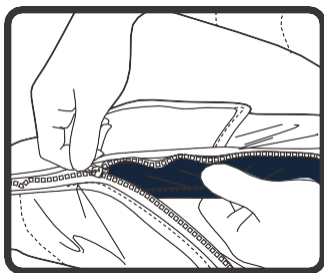

Kaitsekiht



Kasuta luku all olevat kaitsekihti, et nahk ei jääks luku vahele

1. Jalamanseti kasutamiseks, tõmba lukk poole peale, seejärel pane jalg manseti sisse.

2. Tõmmake jalaosa enda rinna poole

3. Tõmba tõmblukk täiesti kinni, jälgi, et riided ei jääks luku vahele.


4. Pane lukk nii nagu pildil näidatud, seejärel kinnita takjariba, et vältida luku avanemist õhusurve tulemusena kui kambrid täituvad õhuga. Kui see juhtub siis ära muretse, lihtsalt lülita seade välja ja kinnita lukk vastavalt eelnevale juhisele.

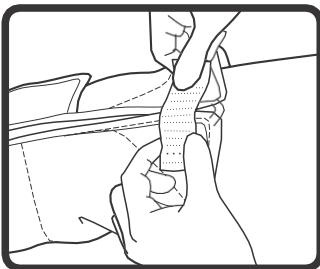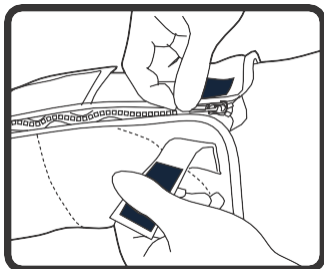

ETTEVAATUS!

Kinnitage takjapael, et õhurõhk ei põhjustaks tõmbluku avanemist õhusurve tõttu. Kui see juhtub siis ära muretse, lihtsalt lülita seade välja ja kinnita lukk vastavalt eelnevale juhisele.


- Õlamansett

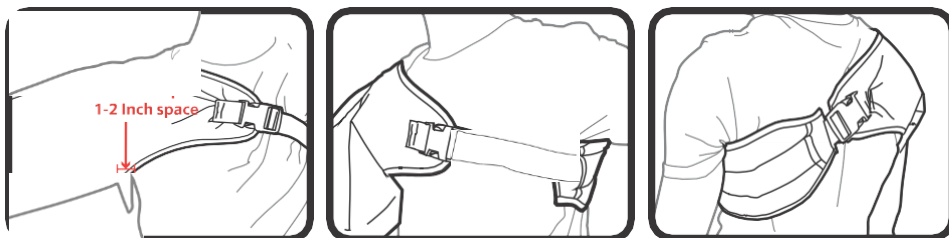

- 1) Pange käsi õlamanseti sisse nii, et lukk jääb käe peale.
- 2) Tõmmake mansetti üle õla nii, et kaela ja manseti vahele jääb 2,5-5 cm ruumi.
- 3) Pange kinnitusrihm ümber kere, vaba käe alla.
- 4) Kinnitage rihm kere külge ja reguleerige pikkust, tõmmatest lukust seni kuni mansett on mugavalt seljas.




ETTEVAATUST!

Üle 100mmHg (Level 10) rõhu kasutamine õlamansetiga pole soovitatav.

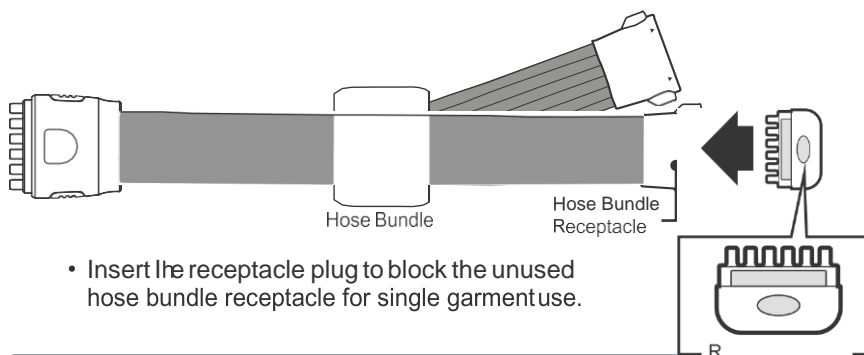

KUIDAS KASUTADA SEDA SEADET

• Puusa mansett

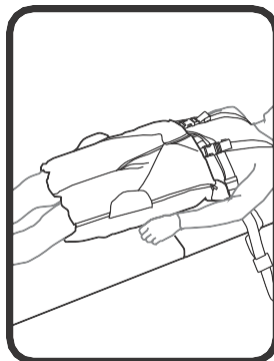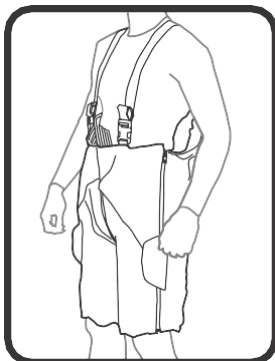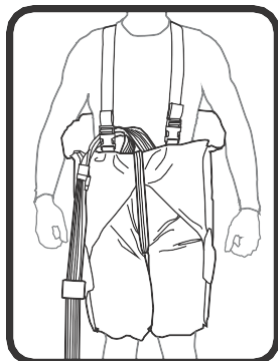

- 1) Aseta puusamansett voodile või diivanile, logo peab jääma ülespoole.
- 2) Puusamanseti mõlemal poolel on lukk. Ava mõlemalt poolt lukk poole võrra.
- 3) Aseta mansetit jalga, sulge lukud. Jäta lukud suletuks terveks sessiooniks.
- 4) Mansett ei tohiks olla liiga ümber. Kui mansett on liiga ümber, vähenda survet või lülita seade välja.
- 5) Puusamanseti mõlemal poolel on 2 traksi. Too traksid üle rinna ja kinnita need. Trakside suurust saab reguleerida.


ETTEVAATUST!

Üle 100mmHg (Level 10) rohu kasutamine puusamansetiga pole soovitatav. Air Relax puusamansett ei ole mõeldud kasutamiseks istudes või seistes. Kasuta neid, olles selili, lamades voodis või muul tasasel pinnal.

HOIATUS!

Kui olete rase või kahtlustate rasedust, ei tohi Air Relax puusamansetti kasutada.

KUIDAS KASUTADA SEDA SEADET

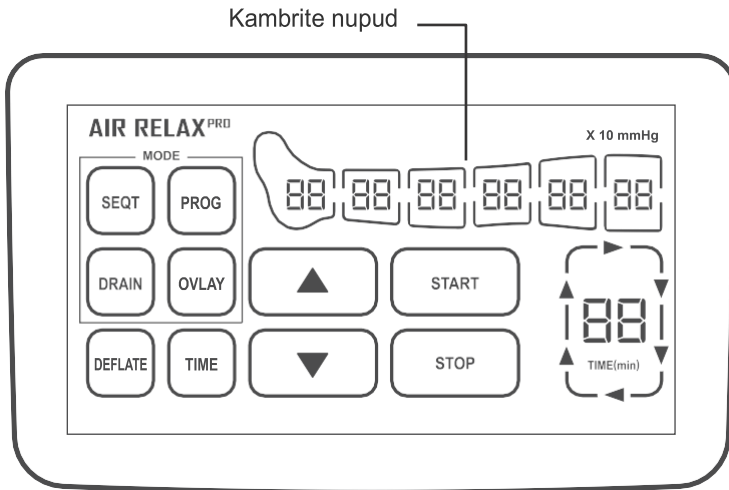

SESSIOONI KÄIVITAMINE

- Ühendage vooliku pistik seadmesse
- Voolikud ei tohi olla keerdus ega volditud
- Vooliku stepsel peab olema täielikult ühendatud, et vältida õhu välja lekkimist.
- Lülitage seade lülitist sisse
- Vaikerežiimiks on drain cycle, ehk 15 minutit survega 80 mmHg
- Vajutage režiimi valimiseks soovitud nuppu: SEQT, PROG, DRAIN või OVLAY. Ekraanil on näha valitud režiim.

KUIDAS KASUTADA SEDA SEADET

Sessiooni alguses kasutatakse rõhu kalibreerimiseks Teie jäseme(te) või keha übermõõdu põhjal mõnda täispuhumistsükli. Esimese kahe tsükli täielikuks täitmiseks võib kuluda kauem aega.

Soovituslik sessiooni pikkus enne treeningut on 15-30 minutit ja peale treeningut 30-45 minutit. 15 minuti pikkune sessioon pakub lõõgastavat massaaži.

SESSIOONI LÕPETAMINE

- Kui sessioon on läbi, siis tühjeneb mansett automaatselt 30 sekundi jooksul.
- Enne manseti eemaldamist lase sellel tühjeneda.
- Sessiooni lõppedes lülitage seade välja (lülitati asub juhtseadme taga)

Seansi lõpus tühjeneb mansett lühikese aja jooksul, võimaldades seda hõlpsasti eemaldada. Peaksite saama mansetti peale panna ja eemaldada ilma lukku täielikult avamata.

ETTEVAATUST

Kui Teil tekib kasutamise ajal tugev valu, ebatavalisi sümptomeid või soovite hädaolukorras survet vähendada, peatage süsteem vajutades STOP nupule, seejärel ühendage voolikukimp juhtseadmest lahti ning eemaldage mansett. Vajadusel pidage nõu oma arstiga.

ETTEVAATUST

Kui Teil tekib valu või ebamugavustunne või kui ilmnevad verevalumid, ärritus või punetus seansi ajal või pärast seda, siis lõpetage kasutamine ja konsulteerige koheselt oma arstiga.

HOOLDAMINE

- Juhtseade: Seadme välispinda saab puhastada pehme, kergelt niiske lapiga.

ETTEVAATUST

Juhtseade ei ole veekindel. Ärge valage juhtseadmele vedelikku ja ärge laske sellel koguneda seadme esipaneelile.

Juhtseade vajab korrapärasest hooldust vähemalt kord 3 kuu jooksul.

- Pistik: Saab puhastada pehme, kergelt niisutatud lapiga.
- Mansett: Puhasta mansette pehme, õrnalt niiske lapiga. Kuivata pehme rätikuga. Enne kasutamist peab mansett olema täiesti kuiv.

ETTEVAATUST

- Pinna pühkimiseks kasutage lappi
- Masinpesu ega keemiline puhastus ei ole lubatud
- Ärge kasutage valgendajat.
- Ärge triikige ega kasutage trummelkuivatust .

HOIUSTAMINE

ETTEVAATUST

Ärge hoidke seadet ekstreemselt külmas või soojas kohas (alla -25°C või üle $+70^{\circ}\text{C}$). Ärge jätke seda kuuma või külma autosse. Ärge jätke seadet otsese päikese kätte.

- Seade toimib temperatuuril ($+10^{\circ}\text{C}$ kuni $+40^{\circ}\text{C}$)
- Seadet võib hoiustada temperatuuril -25°C kuni $+70^{\circ}\text{C}$
- Õhuniiskus 15% kuni 90%
- Atmosfäärirõhk 700-1060 hPa
- Hoida jahedas, kuivas, hästi ventileeritavas kohas. Optimaalne hoiustamine toatemperatuuril.

TÖRKEOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Juhtseade ei lähe tööle.	<ul style="list-style-type: none"> - Pole elektriühendust - Toitejuhe pole õigesti ühendatud - Tühi aku - Sisemine rike 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollige seinakontakti - Veenduge, et toitejuhe oleks korralikult pistikupessa ühendatud - Lülitage toitelüliti sisse. - Laadige akut - Võtke ühendust Air Relaxiga
Juhtseade ei pumpa	<ul style="list-style-type: none"> - Tühi aku - Sisemine rike 	<ul style="list-style-type: none"> - Laadige akut - Võtke ühendust Air Relaxiga
Mansetid ei täitu täielikult	<ul style="list-style-type: none"> - Kahjustatud pistikud - Kahjustatud voolik - Katkised mansetid - Sisemine rike 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollige, et pistikul poleks füüsilisi kahjustusi - Kontrollige, et voolikul poleks sees volte ja keerde. - Kontrollige, kas voolikud on juhtseadme, mansettide ja pistikutega ühendatud - Vaadake ega mansettidel pole auke. - Võtke ühendust Air Relaxiga
Ebatavaline heli	<ul style="list-style-type: none"> - Ebahütlane pind - Sisemine rike 	<ul style="list-style-type: none"> - Tee kindlaks, et juhtseade on tasasel pinnal ning kõik neli jalga on maas. - Võtke ühendust Air Relaxiga

GARANTII

Air-Relax seadmele/lisatarvikutele kehtib tootja poolt ühe aastane garantii alates Air-Relax seadme ostukuupäevast tootmisvigade eest materjalis ja töö kvaliteedis. Juhul kui garantii aja käigus esineb viga, siis tootja omal äranägemisel, kas (a) korrigeerib vea parandusega või vahetades vastava osa või komponendi välja, mis on tekitanud sellise vea seadmes. Ilma lisatasuta osade või töö kulu eest; või (b) vahetab seadme välja sama või uuema seadme mudeli vastu. Air-Relax seadme juurde kuuluvad jalamansetid, seade ja õhuvoolikud.

Käesolev garantii ei hõlma toote tavapärase kulumise ega kosmeetilisi kahjustusi, ning garantii on kehtetu kui seadet/lisatarvikuid ei kasutata vastavalt Kasutusjuhendile; kui seade või selle lisatarviku on muul viisil väärkasutatud või mistahes moel muudetud; ja/või seda on parandatud kellegi muu poolt kui tootja ametlik hooldusteenuse esindaja. See garantii välistab sõnaselgelt transportatsiooni, tarne või kindlustuskulud; vead, kahjud või rikked, mis on põhjustatud seadme või selle lisatarvikute väärkasutamisest, rikkumisest, vales või ebatavalisest kasutusest, või hooletusest.

VÄLJA ARVATUD EELNEVALT MAINITUD GARANTII TINGIMUSTELE, EI VÄLJENDA AIR-RELAX MISTAHES MUUD GARANTIID EGA EELDA MINGIT GARANTIID, SEALHULGAS KAUBANDUSLIKKUST JA SOBILIKKUST TEATUD EESMÄRGIKS JA KASUTAMISEKS, JA GARANTIIAEG PIIRNEB EELNEVALT SELGESÕNALISELT VÄLJENDATUD AJAPERIOODIGA. AIR-RELAX-IL EI OLE MINGIT KOHUSTUST EGA VASTUTUST OMA KLIENTIDE EGA MUUDE ISIKUTE EGA ÜKSUSTE EES.

AIR RELAX EI EELDA MINGIT KOHUSTUST VARALISE KAHJU VÕI KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME OTSESEST VÕI KAUDSEST KASUTAMISEST; SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA VÕI MISTAHES SELLE GARANTII RIKKUMISE EEST; SEALHULGAS KUID MITTE AINULT KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD EBAMUGAVUSEST, AJAKULUST, KINNISVARAST VÕI SISSETULEKUST; EGA MISTAHES KAUDSETE, ERILISTE, ÕNNETUSLIKKUDE VÕI TEGEVUSE TULEMUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST.

Mõned riigid ei luba juhuslike või tulenevate kahjude piiranguid või erandeid, seega eelnevad piirangud või erandid ei pruugi Sinule rakenduda. Garantii annab Sulle teatud seaduslikud õigused, ning Sul võivad olla muud õigused, mis erinevad igas riigis. Juhul kui toote defekt on kaitsitud käesoleva garantii poolt vastava garantiiperioodi vältel, siis saada toode tagasi aadressil: Air Relax, 990 S.Via Rodeo, Placentia, CA 92870, ette makstud tarne kuludega ja kindlustusega ning lisa viide tuvastatud defektile. Kõik asendusosad ja tooted muutuvad Air-Relax omandiks. Garantii teenuse läbiviimise käigus võivad kasutusel olla uued või taastatud osad ja tooted. Remonditud või asendatud osad ja tooted on garantii all kogu ülejäänud algse garantii aja vältel. Sulle esitatakse arve mistahes remondi või asendusosade eest, mis on tehtud väljaspool vastavat garantiiaega.

TAGASTAMISPOLIITIKA

Käesolev tagasisaatmispoliitika rakendub ainult siis, kui Sa oled lõppkasutaja ja ostsid seadme otse Air Relax-ilt.

Juhul kui Sa pole oma ostuga rahul, mis on ebatõenäoline, siis võid selle tagastada (30) päeva jooksul alates ostukuupäevast. Kõikidele tagasisaاتمiste ja asendustele rakenduvad järgnevad tingimused.

1. Tagasisaاتمistel ja vahetamistel peab olema lisatud Kauba Tagasisaاتمisoa (Return Merchandise Authorization ehk RMA) number. Küsi RMA numbrit kirjutades meile e-postil sales@air-relax.com. Ilma RMA numbrita tagasisaadetud toodete eest ei kehti õigus saada oma kontole nende eest krediiti.
2. Tagasisaadud tooted peavad saabuma kohale 15 päeva jooksul alates RMA numbril väljastamisest.
3. Toode ja toote pakend peavad olema tagastatud uues ja kahjustusteta seisukorras. Kõiki tooteid, mis näitavad kulumismärke või on mistahes moel määrdunud määratletakse "vastuvõetamatu" ja Sulle saadetakse selle kohta märguanne. Vastuvõetamatud tagasisaاتمised või asendused saadetakse Sulle tagasi pärast ülevaatuuse/tarnekulude makse kätte saamist.
4. Tagasi saadetud toodetele rakendub 10% uuesti varustamise tasu. Tagasi saadetud toode on toode, mis on saadetud meile tagasi tagasimakse jaoks.
5. Kui Sa keeldud mistahes põhjusel oma tellimuse kättesaamisest, siis saadetakse Sulle tellimuse eest makstud raha tagasi, millest on võetud maha tarnekulud pärast toote kättesaamist ja inspeksiooni.
6. Kõik osalised või täielikud tagasimaksed saadetakse krediitkaardile, mida kasutati ostu tegemise ajal.
7. Air Relax ei vastuta tarne ajal kadunud või kahjustatud asjade eest.

JUHISED TAGASI SAATMISEKS

1. samm: Võta meiega ühendust e-postil sales@air-relax.com, et saada RMA (Return Merchandise Authorization) number.
2. samm: Aseta toode või tooted originaalpakendis ja kogu originaal dokumentatsiooniga tarne kohta pakkekasti. Tee kindlaks, et lisad tarne juurde oma nime, tellimuse numbril (kui see rakendub), kontaktinfo, põhjus tagastamiseks/asendamiseks, ja RMA numbril, et me saaksime korralikult läbi vaadata Sinu tagasisaاتمise või toote asenduse.
3. samm: Tee kindlaks, et Sinu nimi, aadress ja RMA number on samuti lisatud pakkekasti peale ja adresseeri see järgnevalt: Air Relax, 990 S Via Rodeo, Placentia, CA 92870.
4. samm: saada oma tagasisaadetis paki jälgimisteenus ja kindlustusega. Air Relax ei vastuta tarne käigus kaotatud või kahjustatud asjade eest.

• Toote registreerimine aitab meil pakkuda Sulle kiiremat ja efektiivsemat teenust ning toetab ja tagab Sulle selle, et saaksid maksimaalse kasu garantiist. Registreeri oma toode internetis: air-relax.com.

SPETSIFIKATSIOONID

Pinge	100-240 VAC, 50-60 Hz
Energiaarve	80 VA
AC Adapter *Mudel	Input: 100-240 V-, 50-60 Hz, 60 W / Output: DC 18 V, 3.15 A *EM10682P
Aku (valikuline) *Mudel	DC 14.4 V 5000 mA, 72 Wh “MS-4S2P18650
Elektrilöögi eest kaitsmise tüüp	Class II, Internal Power (Option)
Kaitseaste elektrilöögi eest	Type BF
Veekindlus	IP21
Kasutamise ohutuse tase tuleohtliku anesteetilise segu korral koos õhuga või hapniku või dilämmastikoksiidiga	Seade, ei sobi kasutamiseks tuleohtliku anesteetilise segu korral koos õhuga või hapniku või dilämmastikoksiidiga.
Operatsioonisüsteem	Continuos
Kasutusaeg	5-95 minutes
Surve (Max)	40 mmHg — 170 mmHg
Seadme mõõdud	7.67 X 10.4 X 7.08 Inch (195 X 265 X 180 mm)
Seadme kaal	4.85 lbs (2.2 kg)



See toote või selle juhendil olev märgistus näitab, et seda ei tohi selle tööea lõppedes koos teiste olmejäätmetega ära visata, et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest keskkonnale või inimeste tervisele tekkivat võimalikku kahju.

Kodukasutajad peaksid pöörduma kas jaemüüja poole, kust toode osteti või kohaliku omavalitsuse kontoris, et saada teavet kuidas nad saaksid seda keskkonnoahutuks ringlusessevõtuks kulutada. Ärikasutajad peaksid võtma ühendust oma tarnijaga ja kontrollima ostukontakti tinimusi. Seda toodet ei tohi utiliseerimiseks segada muude kommertsjäätmetega.

AIR RELAX™ PRO



9535 Brasher Street
Pico Rivera, CA 90660 USA
+1.525.821.5225
www.air-relax.com
www.air-relax.eu